

## Prevención contra pinchazos de aguja que se ajusta a lo que usted necesita



- ▶ elimina prácticamente la exposición
- ▶ se usa con una mano, la activación es pasiva
- ▶ las manos permanecen detrás de la aguja
- ▶ mecanismo de seguridad integrado
- ▶ evita tener que retirar la aguja y tener que volver a taparla
- ▶ se mantiene segura al desecharla
- ▶ fácil de usar, requiere un entrenamiento mínimo
- ▶ segura y efectiva para los pacientes

Número de Catálogo Descripción

### Jeringas de insulina U-100 VanishPoint® 100 por caja/800 por cartón

15221 Jeringa de insulina VanishPoint 1/2ml 30G x 12,7mm  
10211 Jeringa de insulina VanishPoint 1ml 29G x 12,7mm

### Jeringas VanishPoint® 1ml 100 por caja/800 por cartón

10131 Jeringa para prueba de tuberculina VanishPoint 1ml 27G x 12,7mm

10151 Jeringa para prueba de tuberculina VanishPoint 1ml 25G x 16mm

10161 Jeringa para prueba de tuberculina VanishPoint 1ml 25G x 25mm

### Jeringas VanishPoint® 3ml 100 por caja/600 por cartón

10301 Jeringa VanishPoint 3ml 25G x 16mm

10391 Jeringa VanishPoint 3ml 25G x 25mm

13011 Jeringa VanishPoint 3ml 25G x 38mm

10311 Jeringa VanishPoint 3ml 23G x 25mm

10321 Jeringa VanishPoint 3ml 23G x 38mm

10331 Jeringa VanishPoint 3ml 22G x 25mm

10341 Jeringa VanishPoint 3ml 22G x 38mm

10361 Jeringa VanishPoint 3ml 21G x 38mm

### Jeringas VanishPoint® 5ml 100 por caja/600 por cartón

10511 Jeringa VanishPoint 5ml 25G x 38mm

10531 Jeringa VanishPoint 5ml 22G x 25mm

10541 Jeringa VanishPoint 5ml 22G x 38mm

10561 Jeringa VanishPoint 5ml 21G x 38mm

10581 Jeringa VanishPoint 5ml 20G x 38mm

### Jeringas VanishPoint® 10ml 100 por caja/600 por cartón

11011 Jeringa VanishPoint 10ml 25G x 38mm

11041 Jeringa VanishPoint 10ml 22G x 38mm

11051 Jeringa VanishPoint 10ml 21G x 25mm

11061 Jeringa VanishPoint 10ml 21G x 38mm

11081 Jeringa VanishPoint 10ml 20G x 38mm

### Bandeja de Jeringas para Pruebas de Alergia VanishPoint®

25 por bandeja/1000 por cartón

10134\* Jeringas para pruebas de alergia VanishPoint 1ml 27G x 12,7mm

Tamaños adicionales disponibles. Para una lista completa, por favor póngase en contacto con RTI o visite nuestro sitio web: [www.vanishpoint.com](http://www.vanishpoint.com)



CE 0044 (Excepto el producto marcado\*)

© 2008 Retractable Technologies, Inc.  
Todos los derechos reservados.M023 REV.0

511 Lobo Lane  
Little Elm, Texas 75068-0009 USA  
Tel.: 1 (972) 221-6644  
Fax: 1 (972) 294-4400

Llamada sin cobrar: 1-888-703-1010  
EE.UU./Canadá: [rtisales@vanishpoint.com](mailto:rtisales@vanishpoint.com)  
Internacional: [rti.intl@vanishpoint.com](mailto:rti.intl@vanishpoint.com)

## SEGURIDAD TOTAL PARA EL PROFESIONAL CLÍNICO Y SUS PACIENTES



**VANISHpoint™**  
JERINGAS

El standard nuevo para la seguridad™

## VANISHPOINT® Seguridad a través de su diseño

Mecanismo de seguridad dentro de la jeringa

Diseño de la aguja incorporada: la aguja se retrae directamente del paciente a la jeringa, reduciendo de forma efectiva la exposición a objetos punzantes contaminados

- mantiene un sistema cerrado
- evita la contaminación y las fugas
- ocupa menos espacio
- evita cambios de aguja innecesarios

“El cambio de agujas cuando se extrae la vacuna del vial y se inyecta a un receptor es innecesario”.\*

Seguridad para usted y sus pacientes



\*CDC (Centers for Disease Control and Prevention/Centros para el Control y Prevención de Enfermedades) (2002). Recomendaciones generales sobre vacunación: recomendaciones de el Comité Consultivo sobre Prácticas de Vacunación (Advisory Committee on Immunization Practices, ACIP) y la Academia Norteamericana de Médicos de Familia (American Academy of Family Physicians, AAFP) MMWR (Morbidity and Mortality Weekly Report/Informe semanal sobre morbilidad y mortalidad) 51(RR02):1-36.

# 1

Utilice el procedimiento habitual para extraer la medicación.



# 2

Prepare e inyecte utilizando una técnica aséptica de acuerdo con la política de la institución.



# 3

Mientras la aguja está aún en el paciente, empuje del todo el émbolo para activar la retracción.



# 4

Deseche la jeringa VanishPoint® en un contenedor apropiado para objetos punzantes.



# La VENTAJA VANISHPOINT®

## Diseñada para la seguridad del profesional clínico y del paciente


Una clara visualización de la calibración permite introducir la dosis precisa



La aguja triplemente biselada y lubricada proporciona al paciente comodidad

**ACTIVACIÓN FÁCIL CON UNA SOLA MANO**

**EL OBJETO PUNZANTE CONTAMINADO NO QUEDA EXPUESTO**

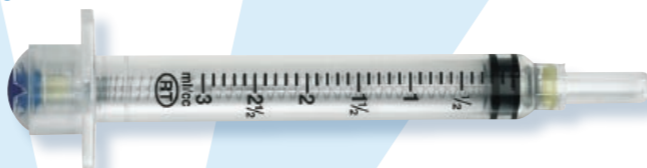

La aguja incorporada previene la contaminación y las fugas

**OCUPA MENOS ESPACIO**

La activación preextracción evita la exposición al objeto punzante contaminado



*Las jeringas activadas VanishPoint® ocupan menos espacio que otras jeringas al desecharlas y evitan heridas relacionadas con su desecho.*

Las agujas incorporadas en las jeringas VanishPoint® son disponibles en una gran variedad de tamaños y calibres. Las jeringas son codificadas por color según el calibre de la aguja.

## Otros productos VanishPoint® de seguridad

**¡NUEVO!**



Catéter Intravenoso VanishPoint®



Portatubo VanishPoint® para la extracción de sangre