

Prevención contra pinchazos de aguja que se ajusta a sus necesidades



- ▶ prácticamente elimina la exposición
- ▶ activación pasiva con una sola mano
- ▶ las manos permanecen detrás de la aguja
- ▶ mecanismo de seguridad integrado
- ▶ evita que se vuelva a tapar o que se extraiga la aguja
- ▶ sigue siendo segura después de su desecho
- ▶ fácil de usar, requiere un entrenamiento mínimo
- ▶ segura y efectiva para los pacientes

Número de catálogo	Descripción
Jeringas para insulina VanishPoint® U-100 100 por caja/800 por estuche	
15271	VanishPoint Jeringa para insulina de 0,5 mL 30G x 8 mm
15221	VanishPoint Jeringa para insulina de 0,5 mL 30G x 12,7 mm
10271	VanishPoint Jeringa para insulina de 1 mL 30G x 8 mm
10211	VanishPoint Jeringa para insulina de 1 mL 29G x 12,7 mm
Jeringas VanishPoint® de 1 mL 100 por caja/800 por estuche	
10131	VanishPoint Jeringa para tuberculina de 1 mL 27G x 12,7 mm
10151	VanishPoint Jeringa para tuberculina de 1 mL 25G x 16 mm
10161	Jeringa VanishPoint de 1 mL 25G x 25 mm

Bandeja de jeringas para pruebas de alergia VanishPoint®	
25 por bandeja/1000 por estuche	
10134	Jeringas para pruebas de alergia VanishPoint de 1 mL 27G x 12,7 mm

Jeringas VanishPoint® de 3 mL 100 por caja/600 por estuche	
13021	Jeringa VanishPoint de 3 mL 27G x 38 mm
10301	Jeringa VanishPoint de 3 mL 25G x 16 mm
10391	Jeringa VanishPoint de 3 mL 25G x 25 mm
13011	Jeringa VanishPoint de 3 mL 25G x 38 mm
10311	Jeringa VanishPoint de 3 mL 23G x 25 mm
10321	Jeringa VanishPoint de 3 mL 23G x 38 mm
10331	Jeringa VanishPoint de 3 mL 22G x 25 mm
10341	Jeringa VanishPoint de 3 mL 22G x 38 mm
10351	Jeringa VanishPoint de 3 mL 21G x 25 mm
10361	Jeringa VanishPoint de 3 mL 21G x 38 mm
10371	Jeringa VanishPoint de 3 mL 20G x 25 mm
10381	Jeringa VanishPoint de 3 mL 20G x 38 mm

Jeringas VanishPoint® de 5 mL 100 por caja/600 por estuche	
Jeringas VanishPoint® de 10 mL 100 por caja/600 por estuche	

Las jeringas VanishPoint® de 5 mL y 10 mL están disponibles con una variedad de calibres y longitudes de agujas. Para obtener una lista completa, comuníquese con RTI o visite nuestro sitio web en www.vanishpoint.com.



511 Lobo Lane
Little Elm, Texas 75068-0009 EE. UU.
Tel.: +1 (972) 294-1770
Fax: +1 (972) 294-4400
Llamada gratuita: 1-888-703-1010
EE. UU./Canadá: rtisales@vanishpoint.com
Internacional: rti.intl@vanishpoint.com
© 2008, 2013 Retractable Technologies, Inc.
Todos los derechos reservados. M023 REV.1 SP, OCT 2013

SEGURIDAD TOTAL PARA EL PROFESIONAL CLÍNICO Y SUS PACIENTES



El standard nuevo para la seguridad

VANISHPOINT® Seguridad a través del diseño

Un estudio que comparó la eficacia de los dispositivos SED (con características de seguridad) *pasivos* con la de los SED *activos*, concluyó que los SED pasivos (como la jeringa VanishPoint®) redujeron considerablemente el índice de lesiones por pinchazos con agujas.¹

Diseño de la aguja incorporada:

- mantiene un sistema cerrado
- evita la contaminación y las fugas
- ocupa menos espacio
- evita cambios de aguja innecesarios

"El cambio de agujas cuando se extrae la vacuna del vial y se inyecta a un receptor es innecesario."²

Seguridad para usted y sus pacientes



¹A. J. Goris, et al., "Reducing Needlestick Injuries from Active Safety Devices: A Passive Safety-Engineered Device Trial," AJIC, vol. 41, issue 6, Supplement (June 2013), p. S80.

²CDC (2002). General recommendations on immunization: recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP) and the American Academy of Family Physicians (AAFP). MMWR 51(RR02):1-36.

1

Utilice el procedimiento estándar para extraer el medicamento.



2

Prepare y administre la inyección utilizando una técnica aséptica según la política institucional.



3

Mientras la aguja todavía se encuentre en el paciente, oprima el émbolo a fondo para activar el mecanismo de retracción.



4

Deseche la jeringa VanishPoint® en un contenedor apropiado para objetos punzocortantes.



La **ventaja de** VANISHPOINT®

Diseñada para la seguridad del profesional clínico y del paciente

La escala transparente y sin obstrucciones permite una dosificación precisa

ACTIVACIÓN FÁCIL CON UNA SOLA MANO

La aguja lubricada y con triple bisel brinda comodidad al paciente

SIN EXPOSICIÓN DEL OBJETO PUNZANTE CONTAMINADO

La aguja se retrae directamente del paciente hacia la jeringa

La activación anterior a la extracción evita la exposición al objeto punzante contaminado

TAMBIÉN DISPONIBLES:
jeringas VanishPoint® de 1 mL y 0,5 mL

Las jeringas VanishPoint® están disponibles con una variedad de calibres y tamaños de agujas incorporadas. Las jeringas están codificadas por color según el calibre de la aguja.




Las jeringas VanishPoint® activadas ocupan menos espacio que otras jeringas al desecharlas y evitan heridas relacionadas con su desecho.

Otros productos de seguridad disponibles


¡NUEVOS!



Set de extracción de sangre VanishPoint®

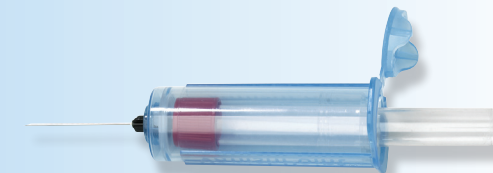

Porta-tubo para muestras sanguíneas VanishPoint®

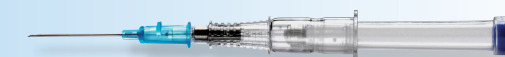

Catéter I.V. VanishPoint®



Jeringa Patient Safe®